

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΪΕΣ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

BUDESIN U 7,5%

Δοκιμασμένο VAH (DGHM)



Αρ. 142.542 Δοχείο 10 λίτρων Αρ.
142.543 Μπουκάλι 6 x 1L

- έτοιμο προς χρήση απολυμαντικό επιφανειών • ελεγμένο σύμφωνα με τις οδηγίες του VAH (DGHM) • Χρήση σε νοσοκομεία, γενικά ιατρεία - ειδικά για ακρυλικό γυαλί ή παρόμοιες επιφάνειες • ιδιαίτερα οικονομικό • έχει ευρύ μικροβιοκτόνο φάσμα δράσης • πολύ αποτελεσματικό ενάντια στα gram-αρνητικά και θετικά κατά Gram

βακτήρια, ζυμομύκητες, μύκητες και ιούς

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Το προϊόν προορίζεται για την απολύμανση σκληρών επιφανειών σε νοσοκομεία και γενικά ιατρεία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ακατέργαστο ξύλο, ακρυλικό γυαλί και παρόμοιες επιφάνειες.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΙ ΕΠΑΦΗΣ:

βακτηριοκτόνος/λευριοκτόνος οργανικός Βάρος	χρόνος έκθεσης [λεπτά]
VAH μικρή ποσότητα 5	

ιοίς (Οδηγίες RKI/DVV) οργανικός Βάρος	χρόνος έκθεσης [λεπτά]
Ιός ηπατίτιδας Β υψηλός 1	
Ιός ιού μικρή ποσότητα 1	
Ιός δαμαλίτιδας υψηλός 1	
BVDV υψηλός 1	

ιοίς (EN14476) οργανικός Βάρος	χρόνος έκθεσης [λεπτά]
Norovirus EN 14476 μικρή ποσότητα 30	
Γρίπη Α (H1N1) Ιός EN 14476	υψηλός 15

Διεύθυνση : 1ο Χιλ.
Χερσονήσου –
Καστελίου Τηλ :
+30 28970 22974
+30 6944 519955

Email:
info@idealcleaning.gr

Υπεύθυνη
Πωλήσεων :
Κληρονόμου Εύα

	οργανικό φορτίο χρόνος έκθεσης [min]	
Ακατέργαστο ξύλο μολυσμένο με μύκητες 60		
ακρυλικό γυαλί κλπ. επιφάνειες 1		
Βακτηριοκτόνο EN 1040 P.aeruginosa, S.aureus 5		
Βακτηριοκτόνο EN 1276 P.aeruginosa, S.aureus, E.coli, E.hirae	μικρή ποσότητα 5	
Βακτηριοκτόνο EN 1276 Salmonella cholerasuis, Listeria monocytogenes	υψηλός 5	
Μυκητοκτόνο EN 1650 C. albicans	μικρή ποσότητα 5	
Μυκητοκτόνο 13624 C. albicans	μικρή ποσότητα 5	
Βακτηριοκτόνο EN 13727 P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae	μικρή ποσότητα 5	
Βακτηριοκτόνο EN 14561 P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae	μικρή ποσότητα 15	
Μυκητοκτόνο EN 14562 C. albicans	μικρή ποσότητα 15	
Βακτηριοκτόνο EN 13697 P.aeruginosa, S.aureus, E.coli, E.hirae 5 Levurocidal EN 13697 C. albicans 15		

Χρησιμοποιήστε μόνο στις προδιαγεγραμμένες συγκεντρώσεις και χρόνους. Ξεπλύνετε τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το δέρμα ή τα τρόφιμα με νερό. Φροντίστε να τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας. Χρησιμοποιήστε το Budesin U 7,5% με ασφάλεια. Πριν από τη χρήση, τηρείτε πάντα τις πληροφορίες της ετικέτας και του προϊόντος. Καμία ευθύνη δεν μπορεί να αναληφθεί για ακατάλληλη χρήση και την προκύπτουσα ζημιά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Εμφάνιση:

..... άχρωμο υγρό Οσμή:

..... σαπουνάδα Ιξώδες:

..... λεπτό Πυκνότητα: .

..... 1000 g/l τιμή pH στο

συμπύκνωμα: 7

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

Λιγότερο από 5%: κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες Περαιτέρω

πληροφορίες: 100 g Budesin U 7,5% περιέχει 0,25 g διδεκυλαμμώνιο

χλωριούχο, 0,25 g χλωριούχου αλκυλοδιμεθυλαμμωνίου και 0,25 g χλωριούχου αλκυλοδιμεθυλοβενζυλαμμωνίου ως

απολυμαντικά δραστικά συστατικά Giscodex: ΓΔ 0 Αριθμός

έγκρισης: N-11981 •Εγκρίθηκε για απολύμανση στην περιοχή του δημόσια υγείας.

Διάρκεια ζωής: στο πρωτότυπο δοχείο τουλάχιστον 3 ετών, προστατεύστε από τον παγετό και τη ζέση

ΤΙΤΛΟΦΟΡΗΣΗ:..... παραλείπεται Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚ/GefahrstoffV, το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο παρασκευάσμα.

Διεύθυνση : 1ο Χιλ.
Χερσονήσου –
Καστελίου Τηλ :
+30 28970 22974
+30 6944 519955

Email:
info@idealcleaning.gr

Υπεύθυνη
Πωλήσεων :
Κληρονόμου Εύα